

MINISTÈRE DES ARMÉES



DIRECTION GÉNÉRALE  
DE L'ARMEMENT

DIRECTION TECHNIQUE

DGA MAITRISE NRBC  
LE BOUCHET  
5, RUE LAVOISIER  
91710 VERT LE PETIT

téléphone : (33) 1 69 90 82 00  
télécopie : (33) 1 64 93 52 66

Classification :

<b>Rapport</b>	<b>Titre</b>	<b>Rapport d'essais</b>
	<b>Référence</b>	<b>RP/20-3142/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1</b>
<b>Prestation</b>	<b>Intitulé</b>	<b>COVID-19 masques</b>
	<b>Référence</b>	<b>2000305</b>
	<b>Destinataire</b>	

Essais réalisés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, sous pilotage de la Direction générale des entreprises.

## 1. ECHANTILLONS TRANSMIS

<b>Fournisseur</b>	
<b>Date de réception des échantillons</b>	24/04/2020
<b>Observations à réception</b>	Sans objet
<b>Référence IFTH</b>	2020-04-17-151_001
<b>Référence interne</b>	MED-1605

<b>Référence fournisseur</b>	05L 20/1 VV
<b>Référence fiche produit</b>	
<b>Description des échantillons livrés</b>	Couche 1 : 100 % viscose (dessus) Couche 2 : thermocollant (couche 1) Couche 3 : 100% viscose (dessous) Couche 4 : thermocollant (couche 3)

## 2. ESSAIS REALISES

Les essais ont été réalisés selon les principes présentés en annexe et conformément au protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

## 3. RESULTATS

<b>Cas d'usage</b>		<b>Protection du porteur (1)</b> (si matériau asymétrique)	<b>Rétention des projections (2)</b>
<b>Caractéristiques</b>		Mesure	Mesure
<b>Perméabilité à l'air</b> (en L.m <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup> )	<b>à dépression</b> <b>100 Pa</b>	Non mesuré	110
<b>Efficacité de protection aux aérosols</b> (en %)	<b>Particules 3 µm</b>	Non mesuré	93
	<b>Particules 1 µm</b>	Non mesuré	77
	<b>Particules fines</b> <b>0,2 µm</b>	Non mesuré	Non mesuré

(1) Usage protection du porteur : flux mesuré de l'extérieur vers l'intérieur, à l'inspiration

(2) Usage rétention des projections : flux mesuré de l'intérieur vers l'extérieur, à l'expiration

## 4. CONCLUSIONS

---

Conformément à la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires, le matériau du masque 05L 20/1 VV de la société ( ) présente une perméabilité à l'air ainsi que des performances en efficacité de protection aux aérosols de 3 µm compatibles avec un usage de type masque de catégorie 1 (masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public).

Il est rappelé que la DGA ne valide pas le design des masques. Conformément à la note du 29 mars, pour éviter les fuites aux bords du masque, l'industriel doit vérifier que celui-ci permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et qu'il ne possède pas de couture sagittale (verticale nez-bouche). Nous attirons également votre attention sur le fait que la mesure de la respirabilité doit être complétée par un test porté pendant 4 heures, à réaliser par l'industriel.

## Annexe descriptive des essais

### Perméabilité à l'air

La respirabilité du matériau est analysée à l'aide d'un perméabilimètre.

L'échantillon a une surface de 20 cm<sup>2</sup>.

Le débit surfacique d'air (litres m<sup>-2</sup>.s<sup>-1</sup>) traversant le matériau est mesuré à une dépression fixée (à 100 Pa ou autre valeur).

La note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages sanitaires impose un débit minimal de 96 L.m<sup>-2</sup>.s<sup>-1</sup>.

La mesure de la respirabilité ci-dessus doit être complétée par un test porté pendant 4 heures, à réaliser par l'industriel.

### Efficacité de filtration

Le masque ou le matériau est découpé à l'emporte-pièce pour réaliser un disque de 48 mm de diamètre. L'échantillon est placé dans une veine contenant un aérosol de poudre de Holi polydisperse. Les concentrations en aérosol dans la veine et dans le flux ayant traversé l'échantillon dans le sens intérieur vers extérieur sont mesurées. Le résultat annoncé est le pourcentage de particules de diamètres 3 µm et 1 µm arrêtées par le matériau.

$$E = 1 - \frac{C_{aval}}{C_{amont}}$$

La note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires impose une efficacité de filtration des particules de diamètre 3 µm émise de :

le public)	- Catégorie 1 (masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public)	Efficacité > 90%
le public)	- Catégorie 2 (masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public)	Efficacité > 70%

perméabilité à l'air est

**Remarque :** L'efficacité de filtration n'est mesurée que si la perméabilité est supérieure à 96 L.m<sup>-2</sup>.s<sup>-1</sup>